

## Configurer Vétocom pour une utilisation avec LAD

Dans *Vétocom*, un « pont » logiciel a été mis en place afin de permettre l'utilisation de *LAD* pour récupérer les analyses depuis les appareils scil.

Afin de profiter de cette fonctionnalité, il est nécessaire de configurer *Vétocom* de la manière suivante :

### 1. Configuration

- Depuis *Vétocom*, accédez au module **LABO** en pressant simultanément les touches **ALT** et **F6** de votre clavier, ou en le sélectionnant sur le **plan de la clinique**.
- Cliquez sur le bouton **scil**, puis cochez la case **LAD**.
- Vérifiez les chemins de données et d'application :
  - Le chemin de données désigne le dossier **DATA** situé dans le répertoire d'installation de LAD\*.
  - Le chemin de l'application désigne le fichier **lad.exe**, situé dans le répertoire d'installation de LAD\*.

### 2. Action quotidienne

En fin de journée, cliquez sur le gros bouton « **importer les résultats** » (dans le module **LABO**).

\* Pour connaître le chemin de LAD dans une configuration en réseau, veuillez vous référer au manuel de LAD, à la page traitant de l'installation de LAD en réseau (page 34).