

Um die LAD Software korrekt zu deinstallieren, müssen die folgenden Schritte eingehalten werden:

1. Das LAD **Programm beenden**
2. Wählen Sie "**Start - Einstellungen - Systemsteuerung**"
3. Wählen Sie den Eintrag "**Software**"
4. Markieren Sie "**LAD - Lad and Diagnostics**" und klicken Sie auf "**Entfernen**"
5. **Löschen** Sie den Ordner **c:\scil\_lad** (mit Hilfe des Windows Explorers)

Die o. g. Schritte müssen auch dann eingehalten werden, wenn die Software erneut installiert werden soll.

Andernfalls kommt es bei einer Neuinstallation zu Fehlermeldungen.