

# i-STAT Update Anleitung

## AKTUALISIEREN VON ANALYSATOR-SOFTWARE: NEUES JAMMLITE DIENSTPROGRAMM


Das neue JammLite Dienstprogramm dient zur Aktualisierung der Software im portablen i-STAT® Analysator. Das JammLite Aktualisierungsverfahren ist einfach, da sämtliche Analysatortypen und Softwareversionen über ein und denselben Bildschirm verarbeitet werden können.

Voraussetzung ist ein Rechner mit Betriebssystem WINDOWS® 98 oder neuere Version.

**WICHTIG: Vor der Durchführung des Updates ist sicherzustellen, dass die Batteriespannung des Analysators > 8,4V beträgt**

### Anschließen der Infrarot Station

1. Alle Anwendungen auf dem PC schließen. Das i-STAT Analyserprogramming Kit über COM - Schnittstelle mit PC verbinden (siehe Abbildung unten)

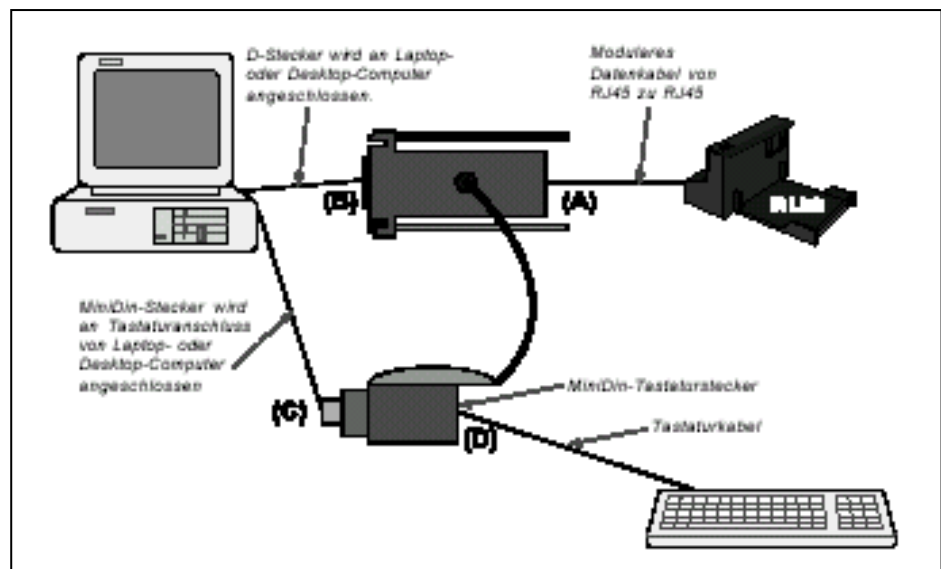

### Kopieren der Dateien


2. CD mit Aufschrift **i-STAT Softwareupdate für Analysator** in Laufwerk einlegen.
3. Nach dem einlegen der CD sollte automatisch ein Fenster mit den Dateien „SU... .exe“ und „Transfer.bat“ geöffnet werden. Starten sie die Installation der Updatesoftware durch Doppelclick auf die Datei „Transfer.bat“. Es öffnet sich ein schwarzes Fenster und schließt sich kurz darauf wieder. Sollte sich nach einlegen der CD das Fenster mit den Dateien nicht automatisch öffnen, so öffnen Sie es manuell durch Doppelclick auf das CD Symbol in Ihrem Arbeitsplatz.




# i-STAT Update Anleitung

---


4. Im WINDOWS mit dem Cursor auf START Button und auf Ausführen klicken. In die Eingabeaufforderung **C:\bins\jamlite** eingeben und die Eingabetaste oder den OK Button drücken.

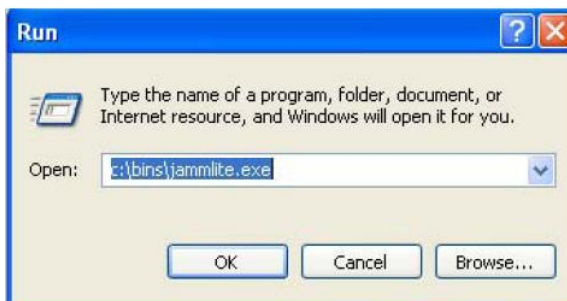

Daraufhin erscheint folgender Bildschirm:


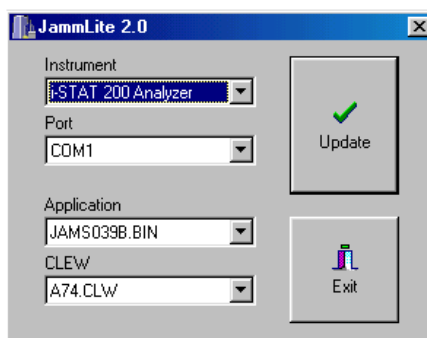


5. In der Dropdown-Liste „Instrument“ **i-STAT 200 Analyzer** anwählen

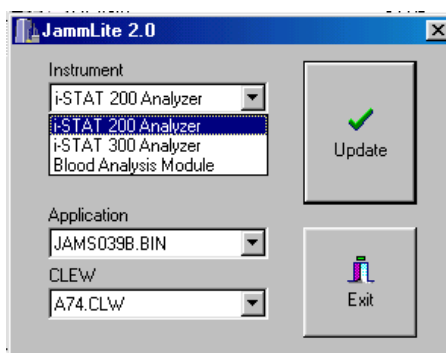


# i-STAT Update Anleitung

6. In den Dropdownlisten „Application“ und „CLEW“ die zu aktualisierende Version und CLEW anwählen (vergleich mit CD-Label)

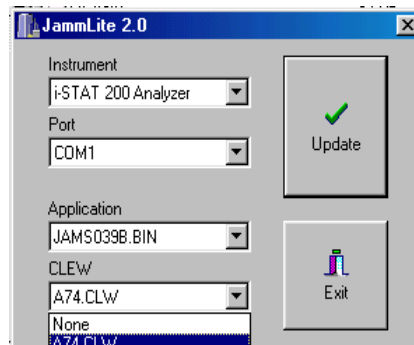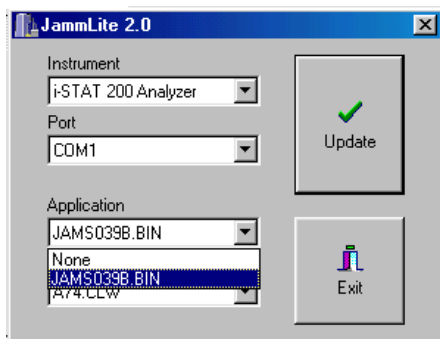


7. Den COM-Anschluß für das zu aktualisierende Gerät aus der Dropdown-Liste „Port“ auswählen. In der JammLite Software werden die verfügbaren COM-Anschlüsse am Computer aufgeführt.
8. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Update“ die Aktualisierung starten. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
- 1) Den zu aktualisierenden Analysator abschalten.
  - 2) Analysator in die IRLink stecken
  - 3) Am Analysator „\*“-Taste gedrückt halten und DIS-Taste drücken

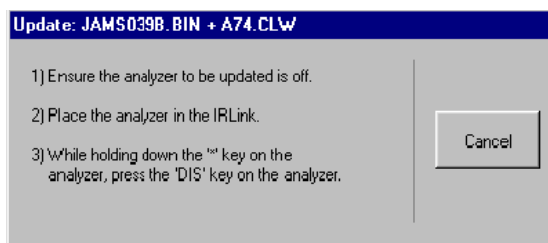

# i-STAT Update Anleitung

---

9. Während der Aktualisierung wird folgender Bildschirm angezeigt:

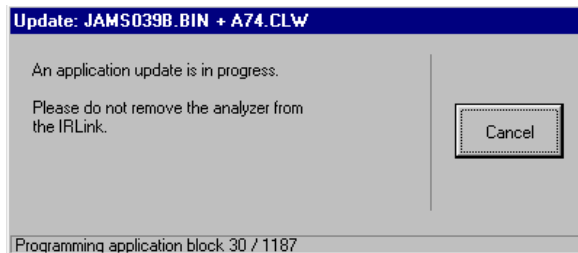


Aktualisieren: aktuelle Version + aktuellen CLEW

Anwendungsaktualisierung läuft

Analysator nicht aus IR-Station herausnehmen

Anwendungsblock 30/1187 wird programmiert

10. Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen

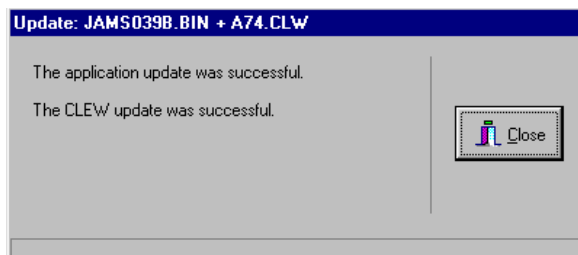

Auf „Close“ klicken. Der Bildschirm aus Schritt 4 wird angezeigt. Auf „EXIT“ klicken um das Jammlite Programm zu beenden.

Sollten Sie Fragen zu dem Jammlite Programm oder Probleme während des Update haben, wenden Sie sich bitte an

scil animal care company GmbH, Dina Weissmann Allee 6  
68519 Viernheim  
Tel.: 06204 7890 221  
Fax: 06204 7890 206

oder an Ihren scil Außendienstmitarbeiter.

