

i-STAT Update Anleitung

Aktualisieren von Analysator-Software: Neues JammLite Dienstprogramm


Das neue JammLite Dienstprogramm dient zur Aktualisierung der Software im portablen i-STAT® Analysator. Das JammLite Aktualisierungsverfahren ist einfach, da sämtliche Analysatorrentypen und Softwareversionen über ein und denselben Bildschirm verarbeitet werden können.

Voraussetzung ist ein Rechner mit Betriebssystem WINDOWS® 98 oder neuere Version.

WICHTIG: Vor der Durchführung des Updates ist sicherzustellen, dass die Batteriespannung des Analysators > 8,4V beträgt.

Anschließen der Infrarot Station

1. Alle Anwendungen auf dem PC schließen. Das i-STAT Analyserprogramm Kit über COM - Schnittstelle mit PC verbinden (siehe Abbildung unten).

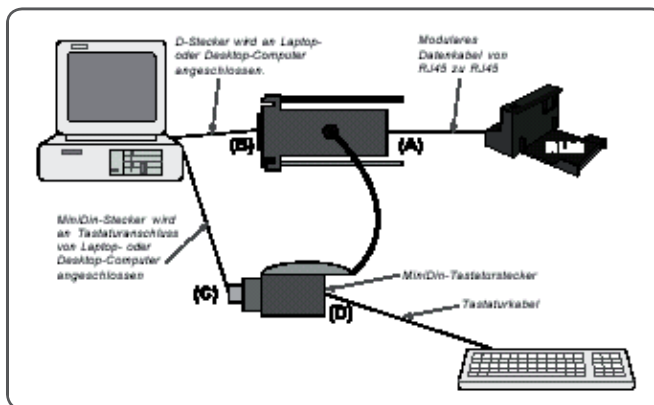

Kopieren der Dateien

2. CD mit Aufschrift i-STAT Softwareupdate für Analysator in Laufwerk einlegen.
3. Nach dem Einlegen der CD sollte automatisch ein Fenster mit den Dateien „SU... .exe“ und „Transfer.bat“ geöffnet werden. Starten Sie die Installation der Updatesoftware durch Doppelklick auf die Datei „Transfer.bat“. Es öffnet sich ein schwarzes Fenster und schließt sich kurz darauf wieder. Sollte sich nach Einlegen der CD das Fenster mit den Dateien nicht automatisch öffnen, so öffnen Sie es manuell durch Doppelklick auf das CD Symbol in Ihrem Arbeitsplatz.




scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 221
Fax: +49 (0) 6204 78 90 206
Email: info-de@scilvet.com
www.scilvet.com

Aktualisieren von Analysator-Software: Neues JammLite Dienstprogramm


4.

Wechseln Sie nun in das Verzeichnis „C:\bins\“ Ihres Rechners und führen Sie einen Doppelklick auf die dort befindliche „Jamlite.exe“ Datei aus.

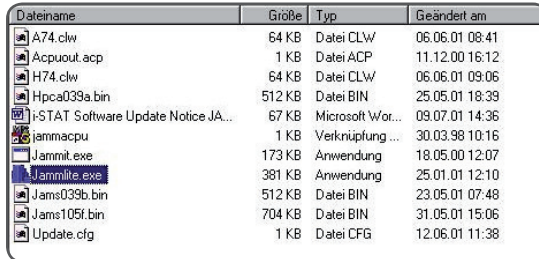


Dateiname	Größe	Typ	Geändert am
A74.clw	64 KB	Datei CLW	06.06.01 08:41
Acpuout.acp	1 KB	Datei ACP	11.12.00 16:12
H74.clw	64 KB	Datei CLW	06.06.01 09:06
Hpca039a.bin	512 KB	Datei BIN	25.05.01 18:39
i-STAT Software Update Notice JA...	67 KB	Microsoft Wor...	09.07.01 14:36
Jammacpu	1 KB	Verknüpfung ...	30.03.98 10:16
Jammit.exe	173 KB	Anwendung	18.05.00 12:07
Jamlite.exe	381 KB	Anwendung	25.01.01 12:10
Jams039b.bin	512 KB	Datei BIN	23.05.01 07:48
Jams105f.bin	704 KB	Datei BIN	31.05.01 15:06
Update.cfg	1 KB	Datei CFG	12.06.01 11:38

Daraufhin erscheint folgender Bildschirm:

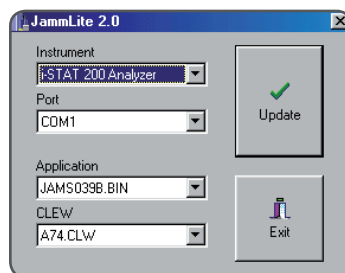



5.

In der Dropdown-Liste „Instrument“ i-STAT 200 Analyzer auswählen.

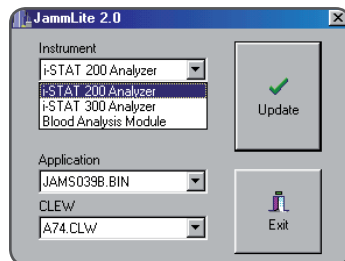

6.

In den Dropdownlisten „Application“ und „CLEW“ die zu aktualisierende Version und CLEW auswählen (Vergleich mit CD-Label).

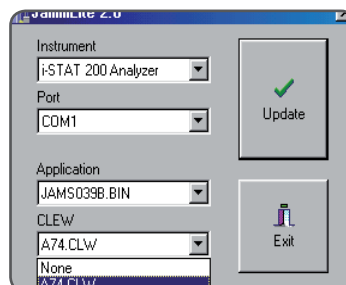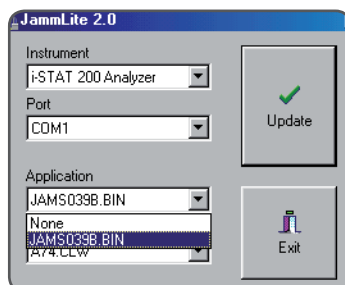

scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 221
Fax: +49 (0) 6204 78 90 206
Email: info-de@scilvet.com
www.scilvet.com


Aktualisieren von Analysator-Software: Neues JammLite Dienstprogramm




7. Den COM-Anschluss für das zu aktualisierende Gerät aus der Dropdown-Liste „Port“ auswählen. In der JammLite Software werden die verfügbaren COM-Anschlüsse am Computer aufgeführt.

8. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Update“ die Aktualisierung starten. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

- 1) Den zu aktualisierenden Analysator abschalten.
- 2) Analysator in die IR-Station stecken
- 3) Am Analysator „*“-Taste gedrückt halten und DIS-Taste drücken.

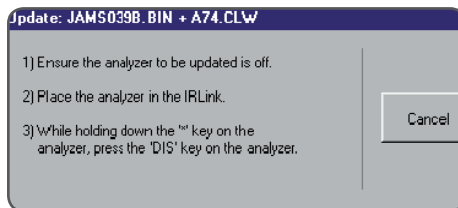


9. Während der Aktualisierung wird folgender Bildschirm angezeigt:

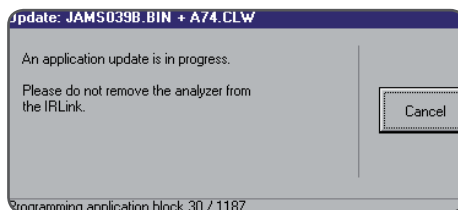

- Aktualisieren: aktuelle Version + aktuellen CLEW
- Anwendungsaktualisierung läuft
- Analysator nicht aus IR-Station herausnehmen
- Anwendungsblock 30/1187 wird programmiert

10. Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen.

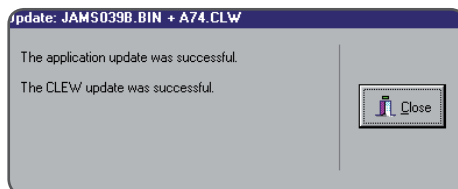

Auf „Close“ klicken. Der Bildschirm aus Schritt 4 wird angezeigt. Auf „EXIT“ klicken um das JammLite Programm zu beenden.

Sollten Sie Fragen zu dem JammLite Programm oder Probleme während des Update haben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Service oder an Ihren scil Außendienstmitarbeiter.



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 221
Fax: +49 (0) 6204 78 90 206
Email: info-de@scilvet.com
www.scilvet.com